

下記の症状に当てはまる方は使用しないで下さい。

- ・医療用電子機器を使用している方
- ・狭心症やそのほか心臓疾患など、重症の並存疾患がある方
- ・急性疾患 ・ 結核症疾患 ・ 有熱性疾患 ・ 血圧異常時 ・ 伝染病疾患
- ・悪性腫瘍 ・ 肺機能不全の方 ・ てんかんの既往のある方 ・ 貧血の方
- ・トリートメント部分に金属が埋め込まれている
- ・妊娠中、または妊娠の可能性がある方、授乳中の方
- ・心臓領域・薬を服用中の方、または使用している方
- ・アレルギー疾患をお持ちの方

※病気で通院中の方、または体調の悪い方

※薬を服用中の方、または使用している方

下記の箇所には使用しないで下さい。

- ・整形手術をした部位・傷口（帝王切開などの跡など）
- ・感覚知覚障害を起こしている部位 ・ 刺青、タトゥーのある部位
- ・静脈瘤 ・ 頭部、顔・月経時の腹部
- ・外科手術等を受けられた部位
- ・矯正や体内に金属を埋め込んでいる部位
- ・皮膚疾患の部位、皮膚に炎症または発疹を起こしている部位
- ・皮膚感染症（イボ・ヘルペスなど）の部位

※誤った使用をされると肌を痛めることがあります。

トリートメント中の注意事項

- ・トリートメントが可能な部位か、お肌状態か確認してください。
- ・アクセサリは外してください。
※指輪をしたままトリートメントする際は、手をアタッチメントから 30cm 以上離してください。
- ・貴金属（金属のボタン、留め金、ピアス、コイン、鍵など）、データキャリアアクセサリ（クレジットカードや USB など）、電子機器（携帯電話、腕時計、PC、タブレットなど）を身に着けないでください。
- ・トリートメント中は他の機器を近くに置かないでください。または電源を切ってください。
- ・遠赤外線着やヒートテックなどの機能性下着は身に着けないでください。
- ・使い捨てカイロなどの鉄粉が入っているものは身に着けないでください。